



Nocolyse One Shot

Desinfektioaine

Nocospray/Nocomax Easy suurtehosumuttimien kanssa käytettävä desinfektioaine huonetilojen vetyperoksidikuivahöyrytykseen.

Käyttökohteet

Erytistilanteet tarttuvien tautien torjunnassa.

Tuoteominaisuudet

Nocolyse One Shot desinfektioainetta käytetään yhdessä Nocospray/Nocomax Easy suurtehosumuttimen kanssa (Nocospray-laitteeseen 1 l pakkaus, Nocomax Easy 20 l kanisteri).

12 % vetyperoksidia ja 17 ppm hopeaa sisältävällä desinfektioaineella on laaja teho bakteereja (ml. tuberkuloosi), viruksia, hiivoja, homeita ja itiöitä vastaan.

Käyttö- ja annostusohje

Huomioi suurtehosumuttimien käyttöön liittyvät ohjeet.

Ohjeellinen annostus 3-5 ml/m³, kontaktiaika (varoaika sumutuksen jälkeen) 1-2 h. Tänä aikana tila säilyy suljettuna, eikä siellä saa käydä. Annostus saavutetaan laitesäädöllä: lisää käsiteltävän tilan kuutiomäärä x3-5. Tarvittaessa käsittely toistetaan.

Koronavirus:

Päivittäinen, ennalta ehkäisevä sumutus Nocolyse tai Nocolyse Food desinfektioaineilla ennaltaehkäisee pintojen kontaminoitumista ja pienentää riskejä (annostus 1 ml/m³, kontaktiaika 30 min.).

Todetussa koronavirustapauksessa kaikki mahdolliset kontaminoituneet pinnat tulee desinfioida. Annostus: 3 ml/m³ (esim. 50 m³ huonetilassa asetetaan ohjelma vastaamaan 150 m³ tilaa).

Toimenpiteen kesto: sumutusaika ja 2h kontaktiaika, huone on käytettävissä 2h sumutuksen lopettamisen jälkeen.

Valmistaja suosittelee tämän jälkeen jatkotoimenpiteeksi päivittäistä ennalta ehkäisevää käsittelyä.

Ylläpitoon voi käyttää myös Nocolyse One Shot desinfektioainetta annostuksella 1 ml/m³, kontaktiaika 1 h.

Huomioitavaa

Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen ja käytettävän laitteen kirjallisiin käyttöohjeisiin.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Stabiloitua vetyperoksidia	12 %	mikrobisidinen tehoaine
hopea	17 ppm	katalysaattori

Tuotteen pH	3.0 hapan		
Varastointi	Lämmin varasto, 5-25°C. Avaamaton pakkaus säilyy 2 v. valmistusajankohdasta. Käytä avattu pakkaus 2 kk aikana.		
Ulkonäkö ja tuoksu	Väritön neste.		
Valmistusmaa	RANSKA		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	<p>Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.</p> <p>Menetelmä ei edellytä ovien tiivistämistä tai ilmastoinnin sulkemista, mutta sumutus- ja kontaktiaikana käsiteltävässä tilassa ei voi oleskella tai käydä. Mikäli käynti on välttämätön ja lyhytaikainen, on käytettävä tiiviitä suojalaseja ja kertakäyttöistä hengityssuojainta. Pitkäaikaisemmassa käytössä kesken sumutuksen on käytettävä hengityksensuojainta NO-P3 kaasusuodattimella. Lue suojautumisohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.</p>		
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	6 x 1 l	8076	
	1 x 20 l	8075	
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		